



# Gebrauchsanweisung Schulterabduktionskissen

## Eine Anleitung in 8 Schritten

Das Modell Schulterabduktionskissen IST ermöglicht es das Kissen für den Patienten kundengerecht so anzulegen, dass es einen perfekten Sitz garantiert und für die Zeit der Ruhigstellung nicht mehr verändert werden muss.

### 1. Schritt:

Zum Anpassen des Kissens empfiehlt es sich, den Patienten sitzen zu lassen. Das Kissen ist so in die Axilla zu positionieren, dass der Oberarm 30 - 40° abduziert ist. Während der Anlage des Kissens empfiehlt es sich, dieses in der richtigen Höhe mit einem Hilfsmittel (Kissen oder Schaumstoffblock) zu lagern.

### 2. Schritt:

Die Fixationsgurte sind so anzulegen, dass der hintere Gurt den Oberarm umfasst. Der vordere Gurt sollte auf der Höhe des Handgelenkes angelegt werden. Dabei ist zu achten, dass die gepolsterten Anteile der Gurte zur Haut zu liegen kommen.

### 3. Schritt:

Anlegen des Horizontalgurts. Hier ist darauf zu achten, dass die gepolsterte Fläche auf der Gegenseite am Thorax zu liegen kommt. Der vordere und hintere Anteil des freien Gurtes sollten ca. gleich lang sein. Nachdem dies angepasst ist, wird mit dem vorderen Klettverschluss der Gurt so nahe wie möglich an der Plastikflasche fixiert.



1. Schritt



2. Schritt



3. Schritt

